

NUEVO valvulotomo HYDRO LeMaitre® de 1,5 mm



NUEVO valvulotomo HYDRO LeMaitre® de 1,5 mm

Navegación suave y segura en vasos pequeños

VALVULOTOMO HYDRO LEMAITRE: LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE VALVULOTOMOS

El nuevo valvulotomo HYDRO LeMaitre es lo último en valvulotomía. Cuenta con un revestimiento hidrofílico del catéter para una inserción menos traumática y un avance más sencillo con una cuchilla de 1,5 a 6 mm. Las nuevas marcas de profundidad del catéter facilitan la localización de la válvula y los vasos tributarios para un mejor posicionamiento en la vena. Las marcas verdes de seguridad de aparición progresiva permiten un mejor control del corte del juego distal de válvulas. Su diseño aún más ergonómico permite la sencilla manipulación general del dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Diámetro exterior del alojamiento de las cuchillas	Diámetro exterior de la vaina protectora	Longitud de trabajo	Longitud total	Diámetro máximo de los brazos	Diámetro máximo de las cuchillas
1,5 mm	1,0 mm	98 cm	110 cm	9,5 mm	6,0 mm
1,5 mm	1,0 mm	40 cm	52 cm	9,5 mm	6,0 mm

- Revestimiento hidrofílico
- 3 marcas de seguridad progresivas
- Rango de la cuchillade 1,5 a 6 mm (talla única)
- Exclusivos brazos/cuchillas autocentrables y autodimensionables


- Marcas de profundidad cada 10 cm
- Puerto de irrigación para solución salina
- El kit incluye 1 valvulotomo retrógrado desechable Valvulotomo LeMills

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	Longitud de trabajo	Longitud total	Contenido del envase	Modelo REF
Valvulotomo HYDRO LeMaitre - 1.5 mm	98 cm	110 cm	1 unidad por envase	1009-00
Valvulotomo HYDRO LeMaitre - 1.5 mm	40 cm	52 cm	1 unidad por envase	1010-00

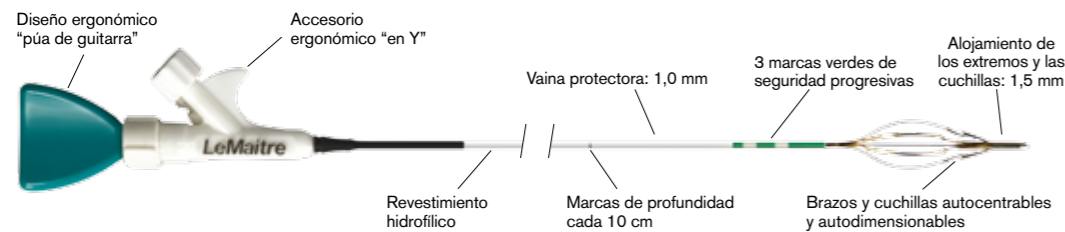

Detalles/dimensiones
3 marcas verdes de seguridad progresivas

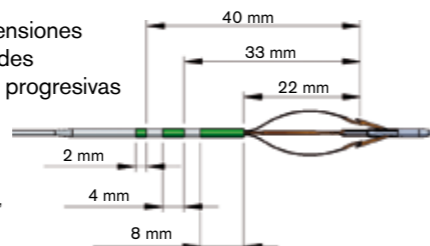

Estas especificaciones no sirven como garantía. En aras de la mejora de los productos, estas especificaciones pueden experimentar modificaciones a lo largo del tiempo sin previo aviso. Consulte a su delegado comercial si desea más información.



Your Peripheral Vision®

LeMaitre y Your Peripheral Vision son marcas comerciales registradas de LeMaitre Vascular, Inc. Patente de los Estados Unidos n.º 5.658.301 y equivalentes del extranjero. ©2014 LeMaitre Vascular, Inc. Reservados todos los derechos. M0330ES Rev.A 09/14



LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts. · Germany
T +49 (0)6196 659230
F +49 (0)6196 527072

LeMaitre Vascular SAS
79 avenue de Villiers
75017 Paris · France
T +33 (0)3 44 26 00 41
F +33 (0)3 44 26 07 31

LeMaitre Vascular S.r.l.
Via Leone Tolstoj 86
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italy
T +39 02 988 48 51
F +39 02 984 97 059

LeMaitre Vascular Spain S.L.
Calle Basauri 17
28023 Madrid · Spain
T +34 902 500 037
F +34 91 184 98 71

LeMaitre Vascular Switzerland GmbH
Grabenstrasse 25
CH-6340 Baar · Switzerland
T 0800 561 761
F +41 415 608 236

LeMaitre Vascular AS
Dronning Eufemias gt. 16
NO-0191 Oslo · Norway
T +49 (0)6196 659230
F +47 21 54 74 67

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803 · USA
T +1 781 221 2266
F +1 781 221 2223

LeMaitre Vascular GK · Japan
T +81 (0)3 5215 5681
F +81 (0)3 5215 5682

LeMaitre Vascular ULC · Canada
T +1 905 673 2266 0
F +1 905 673 2223

LeMaitre Vascular PTY LTD · Australia
T +61 (0) 3 9330 4775
F +61 (0) 3 9330 4772

www.lemaitre.com



Your Peripheral Vision®

NUEVO

Valvulotomo HYDRO LeMaitre® de 1,5 mm

DIÁMETRO MÁS PEQUEÑO DE 1,5 MM CON REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO

El nuevo diámetro más reducido de 1,5 mm y el revestimiento hidrofílico permiten una inserción más fácil y una mejor canalización de la vena de forma menos traumática. La cuchilla más ancha de 1,5 a 6 mm de diámetro permite cortar la válvula en venas de menor diámetro a la vez que sigue permitiendo cortar válvulas en vasos de mayor diámetro. Este innovador dispositivo utiliza brazos autocentrables y autodimensionables para realizar cortes de válvula limpios y correctamente ubicados, reducir la necrosis de las heridas y acortar los tiempos de recuperación de los pacientes.

Indicación ampliada

El valvulotomo HYDRO LeMaitre ahora también está indicado para cortar válvulas venosas durante intervenciones vasculares como:

- Bypass periférico in situ
- Bypass periférico traslocado no invertido
- Bypass de la arteria coronaria
- Creación de una fístula arteriovenosa (FAV) (p. ej., intervención de la arteria radial proximal (ARP))


HYDRO DE 1,5 MM FRENTE A 1.8 MM EXPANSIBLE

- Las cuchillas permanecen un **17%** más abiertas
- El revestimiento hidrofílico reduce las fuerzas de fricción un **50%***
- Las marcas verdes de seguridad permiten que el dispositivo siga abierto en los vasos durante **4.8 cm** más

* Datos en poder de LeMaitre Vascular



Your Peripheral Vision™

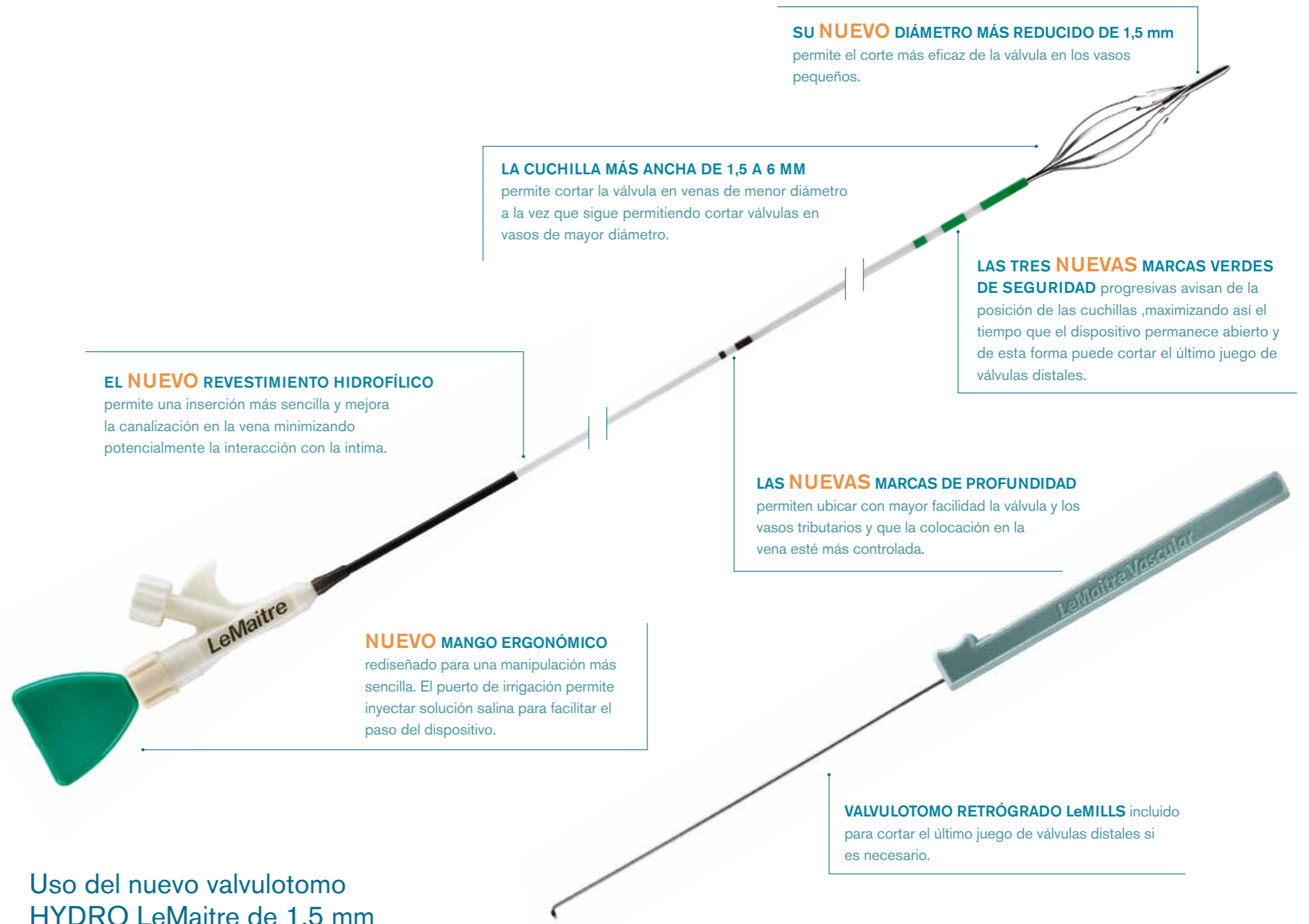


Uso del nuevo valvulotomo HYDRO LeMaitre de 1,5 mm



PASO 1 Haga avanzar el valvulotomo en posición cerrada 2 – 3 cm desde el extremo distal hacia la anastomosis proximal. Las cuchillas deben quedar por encima del primer juego de válvulas hábiles.



PASO 2 Abra el valvulotomo y retire suavemente el instrumento por la vena safena. Los brazos autodimensionables y autocentrables se ajustan automáticamente al diámetro de la vena para realizar un corte óptimo de las válvulas.

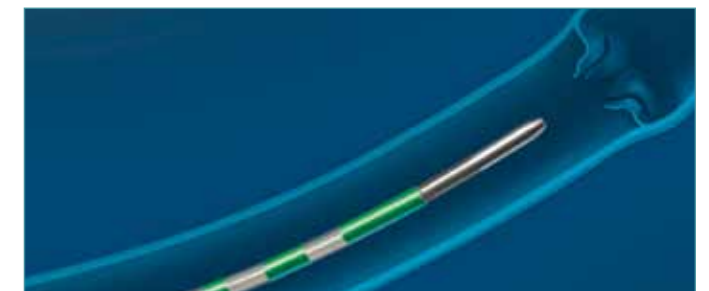

PASO 3 Tres marcas verdes de seguridad avisan de la posición de las cuchillas de corte. Cierre las cuchillas del valvulotomo cuando la tercera y última marca verde de seguridad aparezca fuera de la vena safena antes de retirar el instrumento.